

靴下の町 一奈良県一

奈良県内では国内の約5割の靴下を製造しています。世界中をマーケットに100年以上に渡り靴下を作り続け、その高い技術力は世界的に認められています。水分含有量の高い高品質な大和木綿の産地としても知られる奈良県。高い技術力と良質な素材、そして靴下へのこだわりをもって、日々品質を向上するための努力が続けられています。



日本製

世界で認められた高い開発技術です。

デザイン

心地よい圧迫とやわらかな肌触りを追求しました。

素材

特殊なモコモコ糸を使用しています。



今井 崇裕 先生
医療法人康仁会西の京病院

開発に携わった専門家の声

日本は自然震災が多く、被災者の約9%の方がエコノミークラス症候群で死亡すると報告されています。私たちはより予防効果の高い着圧ソックスを研究しています。「たびぽ」の開発には100名以上の医療スタッフがボランティアで参加しています。伝統的な高い製造技術を有する靴下職人、健康への思いを込めたデザイン科の大学生、皆で2年間の歳月をかけて作り上げた渾身のソックスです。

奈良県発産学医連携
「NARAソックス・プロジェクト」

たびぽ

奈良県発産学医連携
「NARAソックス・プロジェクト」



たびぽ

業界初!

ふんわりソフトな肌ざわりの
医療用弾性ソックス



たびぽ(タオル、ぴったり、サポート)のネーミングの通り、まるでタオルを脚にまとったような心地よい肌触りを感じていただけます。

タオル地なのに ぴったりフィット しっかりサポート

『NARAソックス・プロジェクトとは』

日本の伝統文化である「ものづくり」。奈良県の地場産業である靴下づくりは、世界で認められた高い開発技術を持っています。奈良県の医療スタッフとデザイン科の大学生が連携して、むくみや血栓症の予防に有効な着圧ソックスを作り、皆さんの健康で明るい未来をサポートするプロジェクトです。NARAソックス・プロジェクトのロゴマークの3つの丸は、奈良県の医療スタッフ、靴下職人、デザイン科の大学生を表しています。医療スタッフは超音波検査などの医療機器で血流促進効果のエビデンスを証明しました。靴下職人の高い開発技術によってタオルに使用されるパイル生地を着圧効果を出しました。デザイン科の大学生はソックスのネーミングなどデザインを監修しました。



「たびぽ」制作に携わった畿央大学人間環境デザイン学科 村田ゼミの皆さん(奈良県広陵町)

株式会社リムフィックス 東京都文京区本郷三丁目3番12号 ケイズビルディング4F

TEL.03-3818-8493 FAX.03-3818-8495

<https://www.limfix.com/>

Best Customer Service
LimFix

HOW TO USE

履き方



弾性ストッキングの中に右手を入れ、かかと部分をつまむ。そのまま左手でかかとの部分まで裏返す



かかと部分を両手で引っ張って広げ、つま先からかかとまで履き、かかとの位置を合わせる



履き口が水平になるように位置を合わせる



POINT

裏返した部分を足首の位置で表向きになるように反転させる



履き口を親指で左右に広げながら少しずつ引き上げる



両手の親指を内側に入れ、均等に少しずつ引き上げる




ひざ下まで引き上げたら、かかとの位置がっているか、シワやたるみがないか、ねじれがないか確認する

たぴぽを履くことで足の蒸れは軽減されるか？

蒸散率試験の検証結果

水分蒸散率の比較の結果	たぴぽ群	他社製品群	P-value
水分蒸散率	55.4±6.4	29.7±13.3	0.005

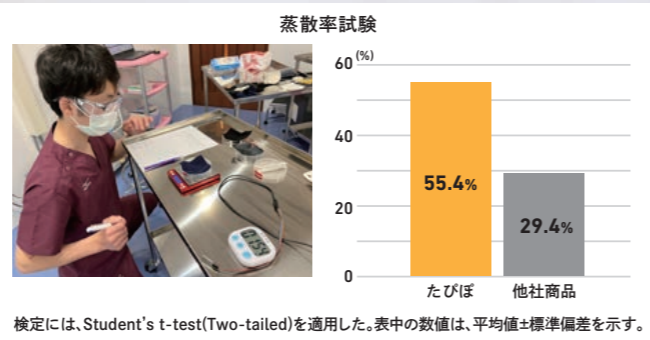

検定には、Student's t-test(Two-tailed)を適用した。表中の数値は、平均値±標準偏差を示す。

結論

たぴぽは他のストッキングより、足が蒸れない！

私たちが自信を持ってお勧めします！



機械で編み上げます。

つま先は手作業で仕上げます。

一足一足丁寧に検品しています。



圧迫圧 | 弱圧
24-32hPa
(18-24mmHg)

肌触りがよく速乾性が高くむれにくい着圧ストッキング

日本人の体型に合わせて幅広の履き口のため膝下の食い込みを軽減。履き口内側の正面にサイズマークが記載されています。

種類・規格

販売名：たぴぽハイソックス
医療機器届出番号：13B3X90009000004

- S TA01
- M TA02
- L TA03



COLOR：ネイビー

圧迫圧：弱圧 24-32hPa/18-24mmHg

単位：1足

希望小売価格：3,850円（税込）

サイズ表 単位：cm

	足首 周囲	ふくらはぎ 周囲	足の サイズ
S	18-20	28-34	21-23
M	20-23	32-38	23-25
L	23-26	36-42	25-27

お手入れ方法

- 1 風合いを保つため、裏返しにして洗濯し、濃色物は淡色物と一緒に洗濯しないでください。
- 2 素材を傷めますので、塩素系漂白剤は使用しないでください。
- 3 タンブラー乾燥は使用しないでください。口ゴムを上にして風通しの良い所で陰干しをしてください。

こだわりポイント

糸に風合いを持たせる手法でモコモコ繊維を作成しました。糸にたっぷり空気層を含ませる事により、タオルのように柔らかく、滑らかな優しい肌触りです。素材を生かした編み・生地作りでこだわり、そしてようやく「たぴぽ」に辿りつきました。

株式会社鈴木靴下
代表取締役
鈴木 和夫さん

